


Schulter OP – Übersicht und Bestellinformationen

 **smith&nephew**
Q-FIX[®] CURVED
All-Suture Fadenanker

Wir stehen Medizinern und
Pflegerinnen unterstützend zur Seite.



1. Legen Sie den Knochen an der Stelle frei, an der das Implantat eingesetzt werden soll. Spannen Sie den geeigneten Bohrer in Ihre Bohrmaschine. Achten Sie darauf, den Bohrer nicht tiefer einzuspannen als die abgeflachten, Seiten am proximalen Ende des Bohrers.

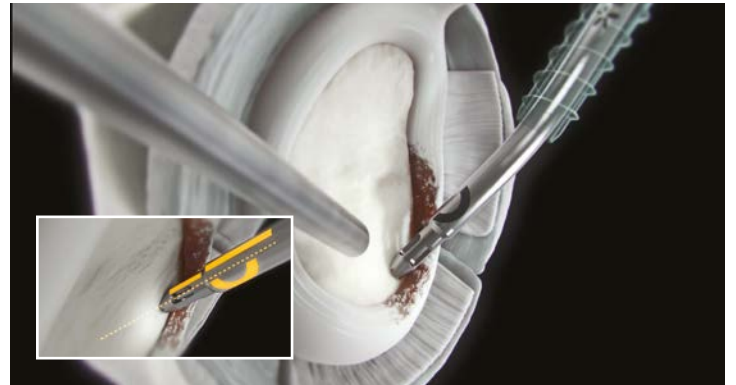

2. Positionieren Sie die Spitze der Bohrhülse mit dem Obturator an der gewünschten Position am Knochen, und entfernen Sie dann den Obturator. Die halbmondförmige Lasermarkierung zeigt die Richtung der Biegung an, während die vertikale Lasermarkierung die Richtung des Bohrers anzeigt.




3. Führen Sie den Bohrer in die Bohrhülse ein, und legen Sie das Bohrloch an, indem Sie den Bohrer so weit ein bohren, bis er am oberen Ende der Bohrhülse aufsitzt.

Achtung: Verwenden Sie den Bohrer nicht ohne Bohrhülse, da ansonsten die Knochenoberfläche beschädigt werden könnte. Sorgen Sie dafür, dass das Bohrloch frei von Knochenspänen ist.



4. Entfernen Sie den Bohrer, und führen Sie das Implantat durch die Bohrhülse in das Bohrloch ein. Achten Sie darauf, dass der Handgriff des Anker-Setzinstrumentes vollständig in der Bohrhülse sitzt.

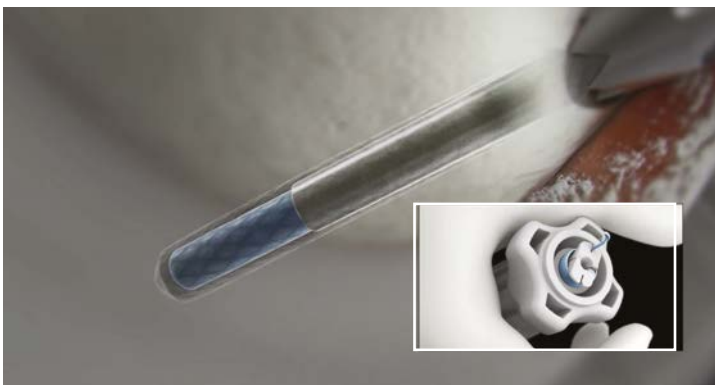

5. Drehen Sie den Aktivierungsknopf am proximalen Ende des Handgriffs im Uhrzeigersinn. Drehen Sie den Knopf bis zum Anschlag und bis die Fadenspule vollständig freiliegt.



6. Lösen Sie die Fäden von der Spule und entfernen Sie das Anker-Setzinstrument und Bohrhülse. Beim Einbringen von mehreren Implantaten wiederholen Sie Schritt 2 bis 5

Bestellinformationen

Q-FIX° All-Suture Fadenanker	
1,8 mm Q-FIX MINI All-Suture Fadenanker	
Artikelnummer	Bezeichnung
72290123	1,8 mm Q-FIX MINI All-Suture Fadenanker, steril
72290125	1,8 mm Q-FIX MINI Einweg-Kit, steril
25-1812	1,8 mm PATHFINDER° Obturator, wiederverwendbar
1,8 mm Q-FIX All-Suture Fadenanker	
Artikelnummer	Bezeichnung
25-1800	1,8 mm Q-FIX All-Suture Fadenanker, steril
25-1810	1,8 Q-FIX Einweg-Kit, steril
Q-FIX 1,8 CURVED Instrumente	
72290120	1,8 mm gebogene Bohrhülse, wiederverwendbar
72290118	1,8 mm Q-FIX flexibler Einweg-Bohrer, steril
72290124	1,8 mm Q-FIX MINI flexibler Einweg-Bohrer, steril
2,8 mm Q-FIX All-Suture Fadenanker	
Artikelnummer	Bezeichnung
25-2800	2,8 mm Q-FIX All-Suture Fadenanker, steril
25-2810	2,8 mm Q-FIX Einweg-Kit, steril
25-2812	2,8 mm PATHFINDER Obturator, wiederverwendbar
25-2820	2,8 mm Knochenahle für Q-FIX All-Suture Fadenanker, wiederverwendbar

Alle Fotos und Diagramme dienen ausschließlich der Veranschaulichung. Produkte sind nicht maßstabgetreu abgebildet.

Nähere Informationen zur Anwendung der in dieser Präsentation besprochenen Produkte, einschließlich Indikationen, Kontraindikationen und sicherheitsrelevanter Produktinformationen, erhalten Sie in der Gebrauchsanweisung des jeweiligen Produkts. Zur Bestellung der Instrumente rufen Sie in den USA bitte **+1 800 343 5717** an, oder wenden Sie sich an einen autorisierten Smith & Nephew Vertreter.

Kontakt
Smith & Nephew GmbH
Friesenweg 4 / Haus 21
22763 Hamburg

info@smith-nephew.com
www.smith-nephew.de

Hersteller
ArthroCare Corporation
7000 West William Cannon Drive
Austin, TX 78735, USA

EU-Beauftragter
Smith & Nephew Medical Limited,
101 Hessle Road,
Hull HU3 2BN, UK

Bestellannahme
T 0800 664 75 78
F 040 879 744 375

°Trademark of Smith & Nephew.
©2018 Smith & Nephew.
All rights reserved.
Printed in USA.
11907-de V1 01/18

T +49 (0)40 87 97 44 - 0
F +49 (0)40 87 97 44 - 375

Wir stehen Medizinern und Pflegekräften seit über 150 Jahren unterstützend zur Seite.